

Smart Implant Solutions

Instrucciones para importar las librerías de Smart
Implant Solutions en el software Dental Wings



Descargar el software

Desde un ordenador, conectarse a **www.smartimplantsolutions.com**


En el menú DESCARGAS, ir al apartado CAD/CAM y pulsar en "LIBRERÍA DENTAL WINGS".

Se descargará un archivo llamado "SIS Dentalwings.zip" en la carpeta *Descargas* de su PC.

Importar la librería de Smart Implant Solutions


Importar la librería en DWClient.

Seleccionar en el menú Aplicación -> Implantes.

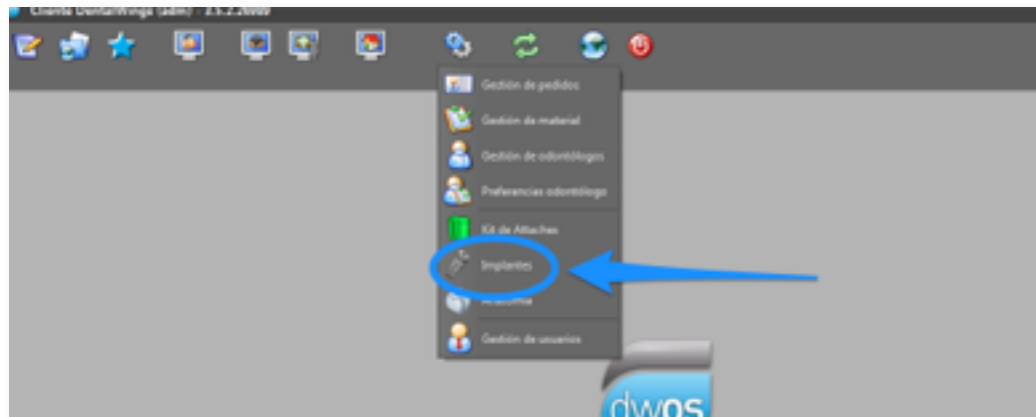


Importar la librería de Smart Implant Solutions

Coloque el cursor sobre "Implantes" y pulse el botón derecho. En el menú desplegable seleccione "Importar kit del fabricante de implantes".

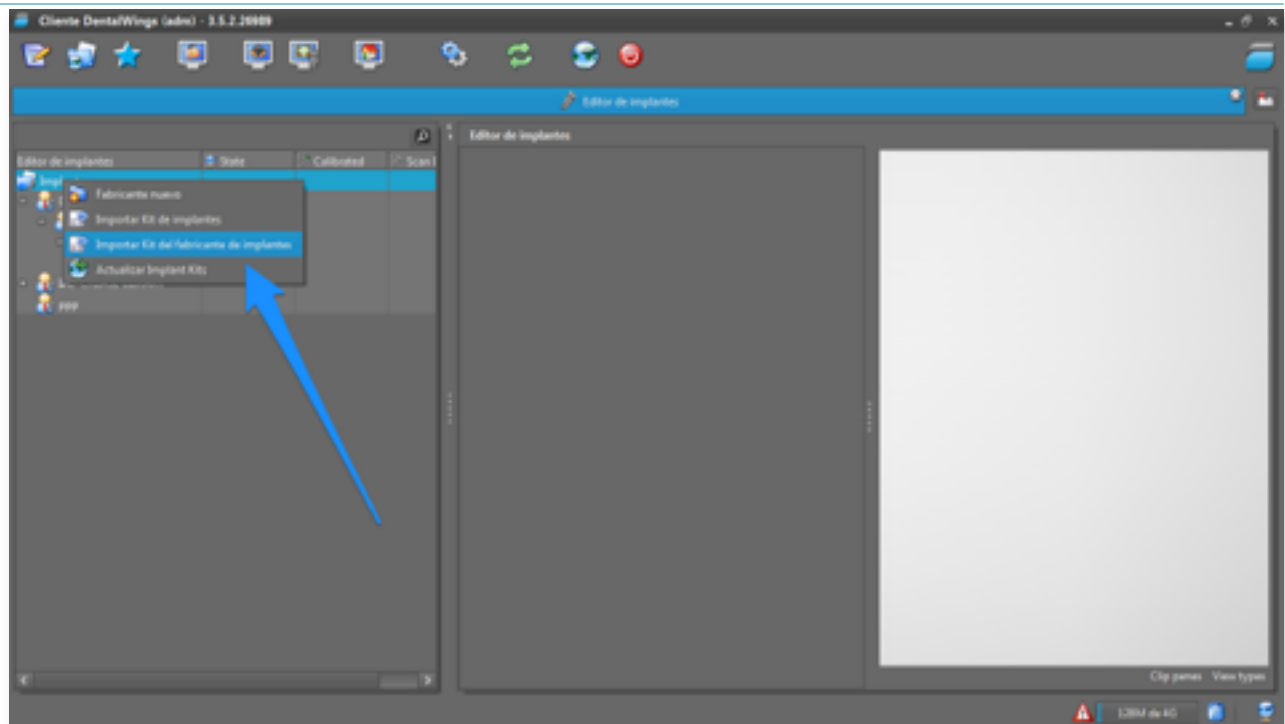


Importar la librería de Smart Implant Solutions

Localizar el fichero descargado (estará en la carpeta *Descargas* de su PC) y pulsar "Abrir".

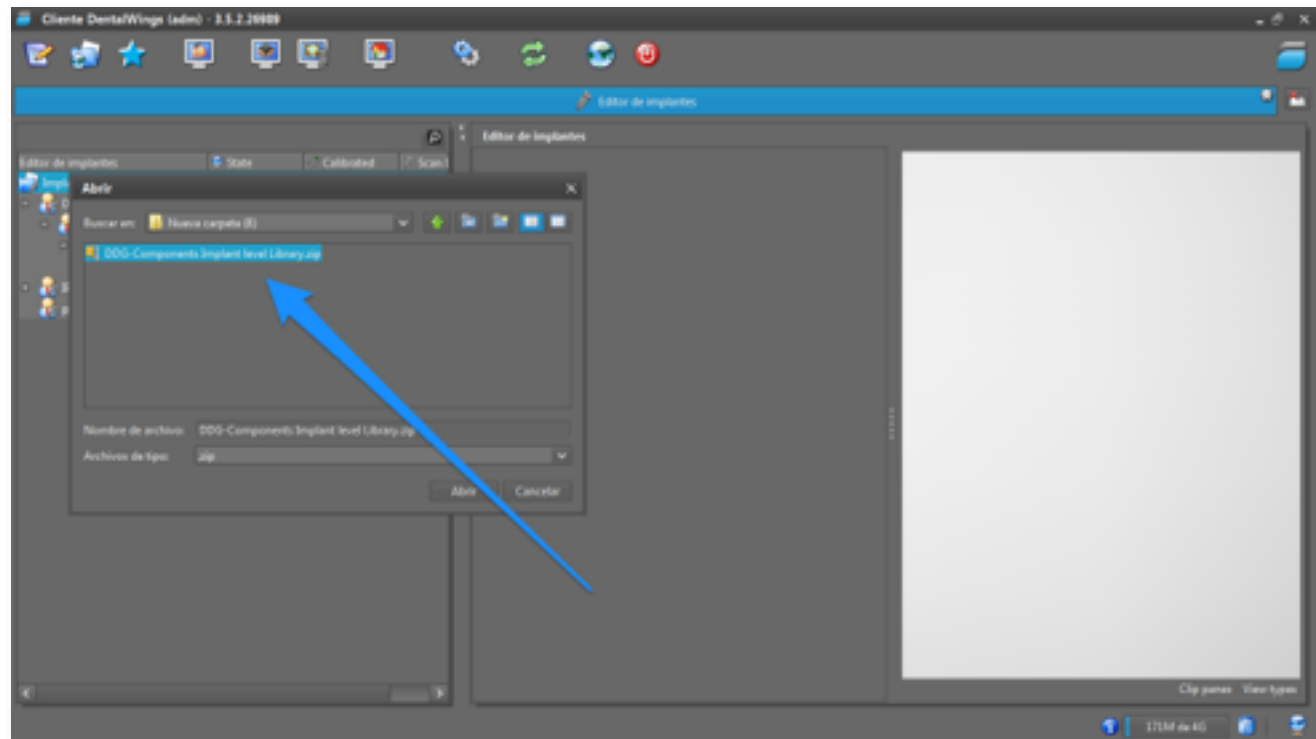


Importar la librería de Smart Implant Solutions

Cuando la librería se exporta correctamente verá que se añade la librería de implantes disponible de SIS.

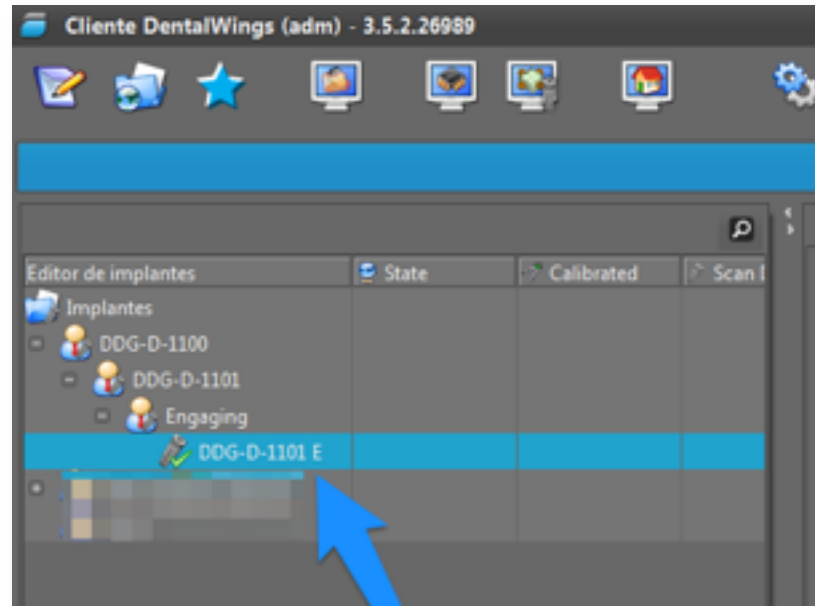


Importar la librería de Smart Implant Solutions

Cuando selecciona un kit en la pantalla se muestran todos los componentes de este kit.

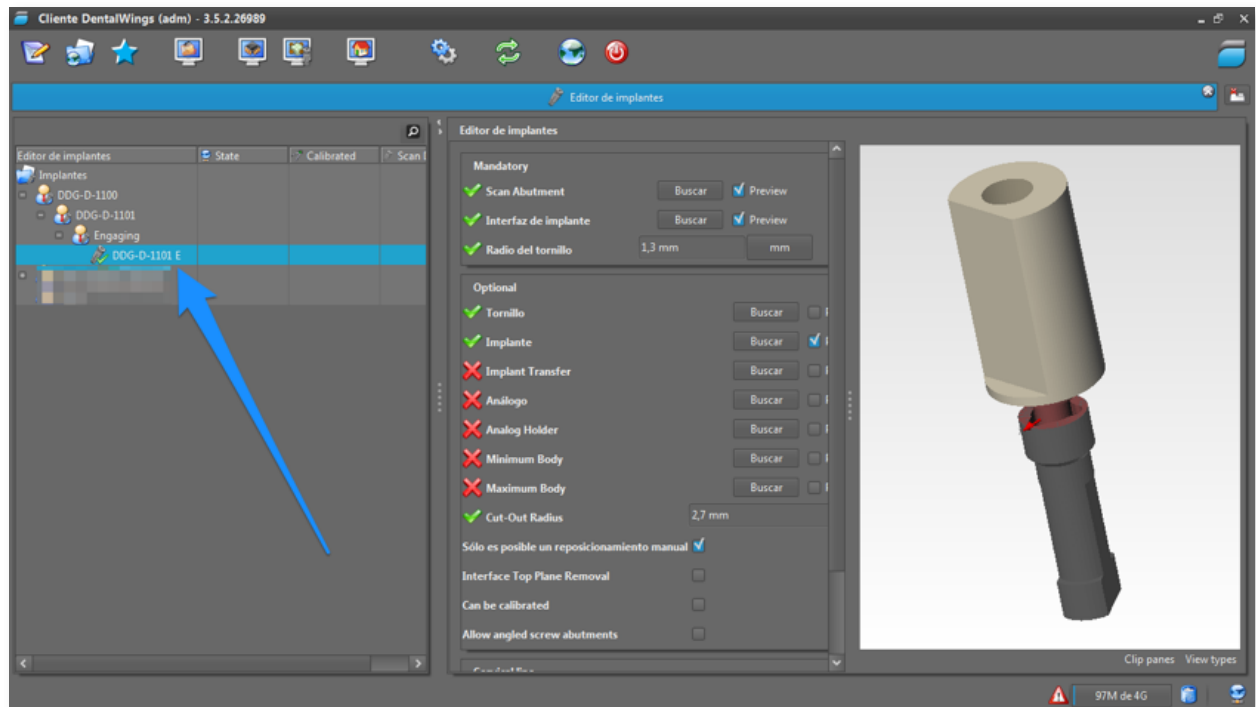


Importar la librería de Smart Implant Solutions

Ahora ya puede elegir la conexión que quiera diseñar.

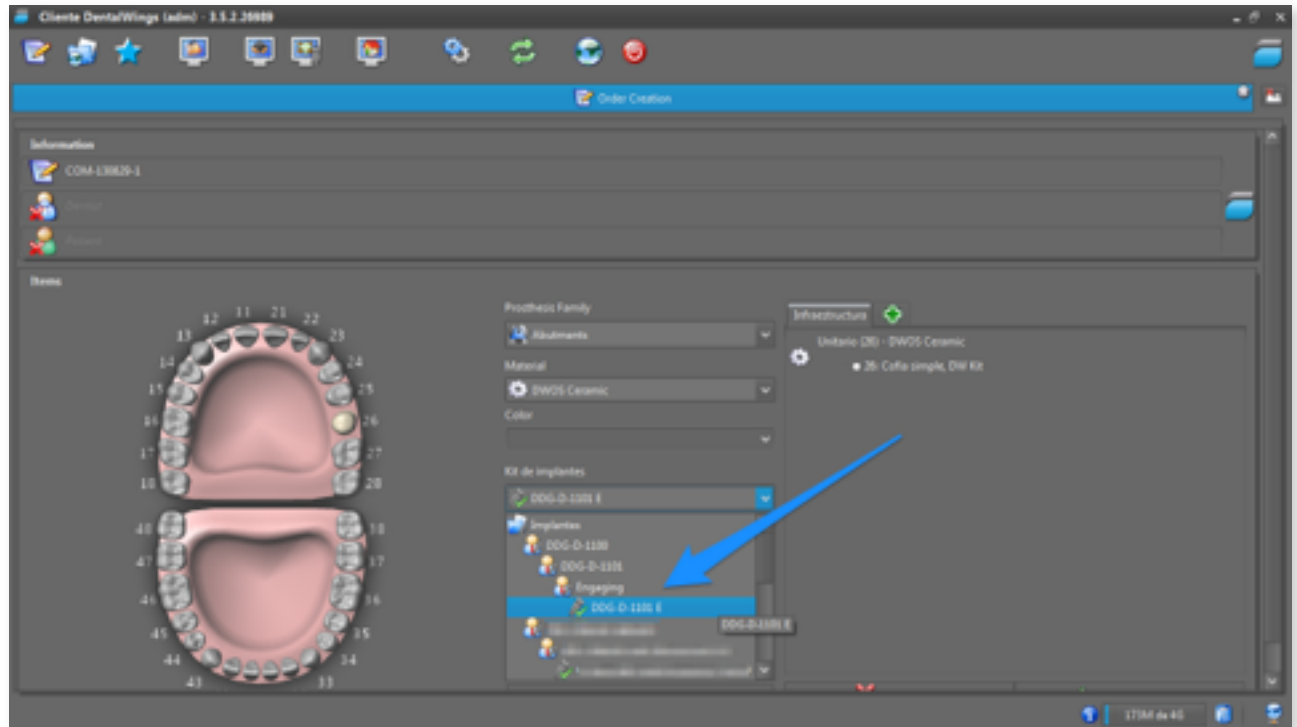

Diseñar

¡Todo esta listo para empezar a trabajar!

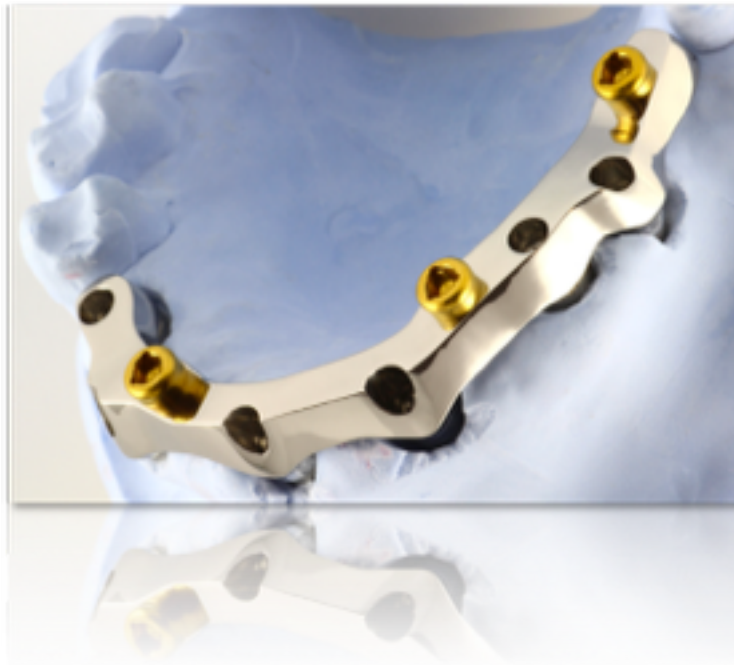

Gracias por confiar en nosotros

Smart Implant Solutions



info@smartimplantsolutions.com