




INSTRUCCIONES

CÓMO IMPORTAR LAS LIBRERÍAS MODELCREATOR
DE SMART IMPLANT SOLUTIONS EN EL SOFTWARE EXOCAD



1. Desde un ordenador, conectarse a: www.smartimplantsolutions.com
2. En el menú principal, pincha en el botón **DESCARGAS**.

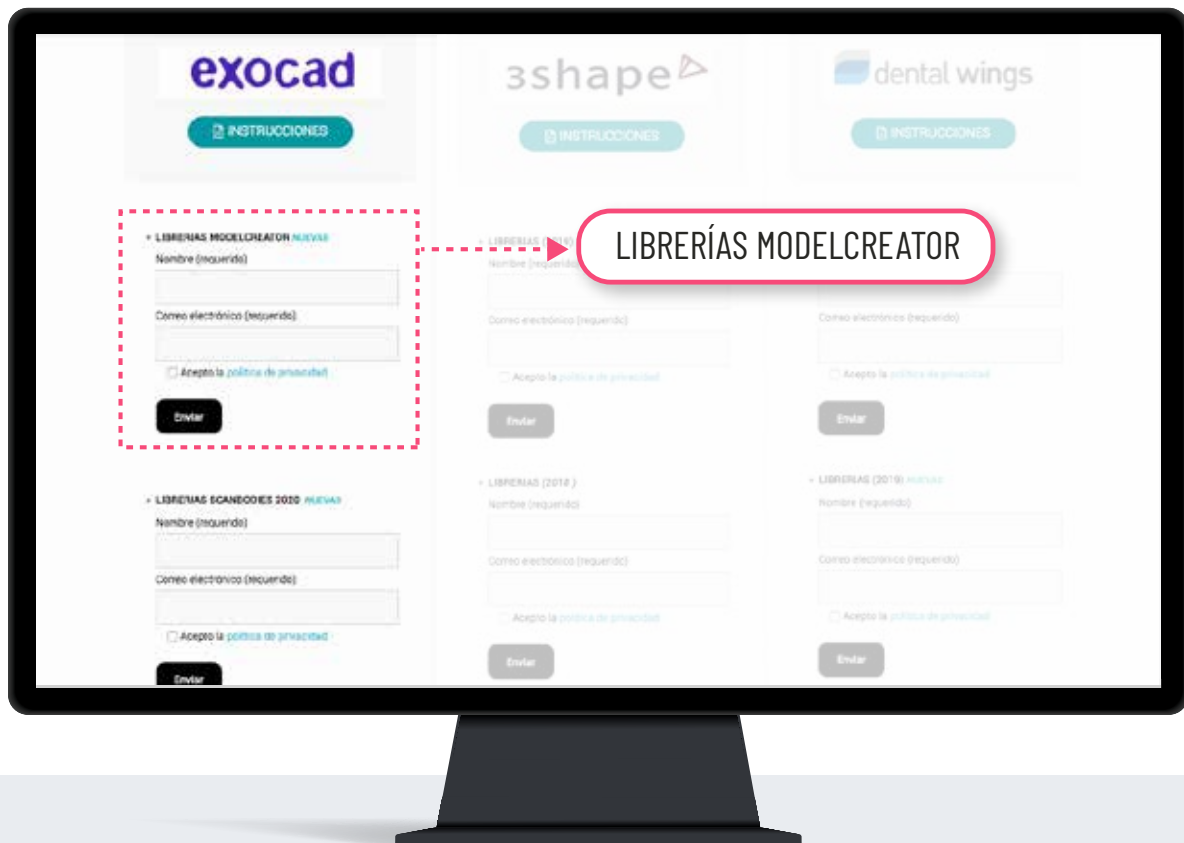

• **LIBRERIAS MODELCREATOR NUEVAS**

Nombre (requerido)

1

Correo electrónico (requerido)

2

3 Acepto la [política de privacidad](#)

4

PUEDA DESCARGAR EL ARCHIVO EN EL SIGUIENTE ENLACE:

5 [SIS-MODELCREATOR-LIBRARY-EXOCAD_2020](#)

↓

[ENLACE DE DESCARGA](#)

RELLENE LOS CAMPOS DEL FORMULARIO

1. Introduce tu nombre.
2. Introduce tu email.
3. Acepte la política de privacidad.
4. Pulse el botón **ENVIAR**.

Una vez enviado el formulario, se visualiza el enlace para decargar la librería.

5. Pinche en el enlace: **SIS-MODELCREATOR...**
6. Se descargará el archivo en la **carpeta Descargas** de su PC.

2. INSTALAR LIBRERÍA MODELCREATOR

1 DESCOMPRIMIR ARCHIVO .ZIP

1. Vaya a la **carpeta Descargas** de su PC.
2. Descomprima el archivo llamado:

"SIS-MODELCREATOR-LIBRARY-EXOCAD_2020.zip".

Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como WinZip o WinRar.



WinZip





WinRar

Cuando descomprima el archivo le saldrá una carpeta llamada "SIS-MOLDECRETATOR-LIBRARY-EXOCAD_2020" que contiene:



2 COPIAR CARPETAS

1. Abra la carpeta SIS-MOLDECRETATOR-LIBRARY-EXOCAD_2020
2. Seleccione y copie todas las carpetas.
3. Péguelas en la siguiente ruta **C:/exocad/DentalCADApp/library/MODELCREATOR/implants**

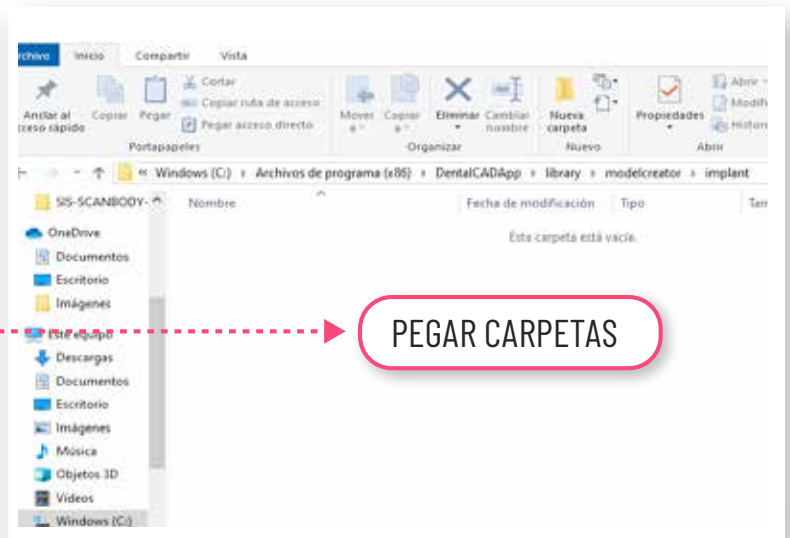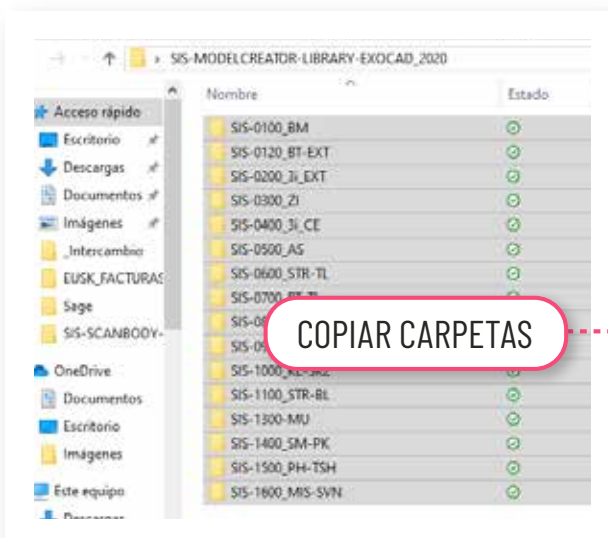

ATAJO: A través del navegador de archivos de su ordenador puede buscar rápidamente la ruta que se indica.

C:/exocad/DentalCADApp/library/MODELCREATOR/implants

3 COMPROBACIÓN

Asegúrese que tiene las librerías correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad.

Entre en la carpeta **implants** y localice que estén los los archivos copiados.

3. EJECUTAR LIBRERÍAS MODELCREATOR

1 EJECUTAR EXOCAD

